

Filtek™ Bulk Fill

для жевательных зубов



Раз — и ГОТОВО!

Реставрационный материал,
вносимый одной порцией


3M

Filtek™ Bulk Fill

для жевательных зубов

С реставрационным материалом Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов процедура реставрации становится максимально простой.

Всего один шаг внесения материала – порцией до 5 мм без перекрывающего слоя!
Получите быструю и надежную реставрацию без лишних усилий и полимеризационного стресса.
Раз – и готово!

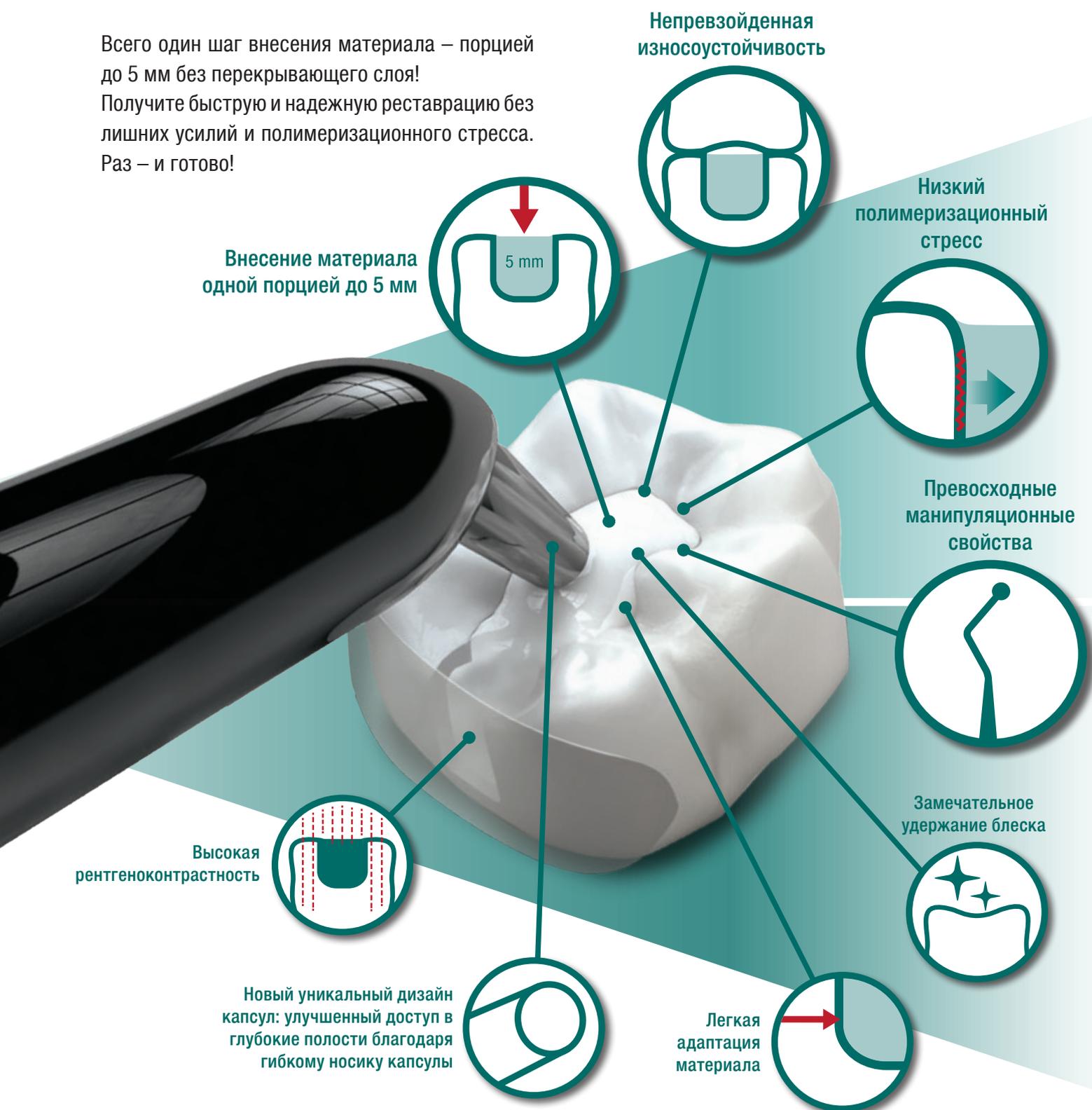

Filtek™ Bulk Fill

для жевательных зубов

Европейские стоматологи* убедились в преимуществах реставрационного материала Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов:



Экономия **24%** времени на внесение по сравнению с послойной техникой внесения




90% стоматологов удовлетворены манипуляционными свойствами материала и изъявили желание его приобрести



92% стоматологов порекомендовали бы материал коллегам



Нанокластеры, увеличенные в 5 тыс. раз

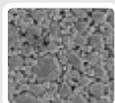

Нанокластеры, увеличенные в 25 тыс. раз



В реставрационном материале Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов используется та самая **нанотехнология**, которая была проверена временем в других лидирующих реставрационных материалах Filtek™. Эта технология является залогом высокой прочности, удобства в работе, лучшей износоустойчивости и превосходной полируемости реставраций.

Кроме наночастиц, Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов содержит инновационное сочетание **метакрилатных мономеров**, позволяющих снизить полимеризационный стресс без снижения износоустойчивости.

Комбинация этих двух технологий в одном реставрационном материале позволяет сделать процесс реставрации жевательных зубов более простым и быстрым!

* В исследовании приняли участие 150 европейских докторов-стоматологов.

Продукты 3M ESPE

экономят Ваше время на протяжении всей процедуры



Адгезив
Single Bond Universal



Универсальность,
надежность и отсутствие
постоперационной чувствительности.



Filtek™ Bulk Fill
для жевательных
зубов



Внесение **одной порцией,**
глубиной до 5 мм,
непревзойденная износостойчивость и
низкий полимеризационный стресс.



Светодиодная лампа
Elipar™ S10



Быстрая и
глубокая полимеризация,
уникальный эргономический дизайн.



Спиральные диски для финишной
обработки и полировки
Sof-Lex™ Spiral



Одна универсальная
форма легко адаптируется к любым
поверхностям зуба под любым углом.

С продуктами 3M ESPE

реставрации жевательных зубов еще проще и быстрее

Клиническое применение реставрационного материала Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов



Исходная ситуация: замена старых композитных реставраций на первом и втором молярах.



Реставрации удалены, полости отпрепарированы.



Адгезивная подготовка полостей.



Внесение композита Filtek Bulk Fill Posterior в полость одной порцией до 5 мм.



Скульптурирование и адаптация композита.



Полимеризация по 10 секунд со сторон трех поверхностей: окклюзионной, щечной и язычной через глицириновый гель.



Финишная обработка реставраций дисками Sof-Lex Spiral.



Окончательный вид реставраций.

Информация для заказа:



Местные анестетики Ubistesin

Артикул	Информация о продукте
15110	Ubistesin™ 1/200000 Упаковка: 1 Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)
15010	Ubistesin™ 1/100000 Упаковка: Упаковка с 50 карпулами (по 1,7 мл)

200
капель



Адгезив Single Bond Universal

Артикул	Информация о продукте
41265	Ознакомительный набор Single Bond Universal Adhesive: 1 флакон с адгезивом Single Bond Universal (5 мл), 50 емкостей для замешивания, 50 микрошпатель, 1 шприц с протравочным гелем (3 мл), 25 насадок-аппликаторов для шприца с протравочным гелем
41266	Single Bond Universal Adhesive Рефил: 1 адгезив (5 мл)
41276	Single Bond Universal Adhesive Ознакомительный набор L-Pop™: 40 унисдоз, 1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл), 25 насадок-аппликаторов
41278	Single Bond Universal Adhesive Большая упаковка L-Pop™: 100 унисдоз
41263	Универсальный протравочный гель Scotchbond™: 2 шприца с протравочным гелем (по 3 мл), 50 насадок-аппликаторов
41268	Активатор двойного отверждения Single Bond Universal DCA: 1 флакон (5 мл)
41274	Насадки-аппликаторы для шприца с протравочным гелем Scotchbond™: 25 насадок-аппликаторов

40
реставраций



Реставрационный материал Filtek™ Bulk Fill для жевательных зубов

Артикул	Информация о продукте
4864TK	Набор для метода с использованием капсул: 40 капсул по 0,2 г (8 г), 5 мл адгезива Single Bond Universal, 12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral, 1 мандрела
4863TK	Набор для метода с использованием шприцов: 2 шприца по 4 г (8 г), 5 мл адгезива Single Bond Universal, 12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral, 1 мандрела

Упаковка	Артикул	Артикул	
Оттенок	Шприцы	Капсулы	
A1	4863A1	4864A1	Шприцы: 1 шприц (4 г)
A2	4863A2	4864A2	
A3	4863A3	4864A3	Капсулы: 20 капсул по 0,2 г (4 г)
B1	4863B1	4864B1	
C2	4863C2	4864C2	



Светодиодная полимеризационная лампа Elipar™ S10

Артикул	Информация о продукте
76951	Полимеризационная лампа Elipar™ S10
76958	Elipar™ S10 световод 10 мм
76959	Elipar™ S10 световод 3 мм
76957	Elipar™ S10 защитная пластина для глаз
76956	Elipar™ S10 ионно-литиевая батарея



Спиральные диски для финишной обработки и полировки Sof-Lex™ Spiral

Артикул	Информация о продукте
5082I	Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral - ознакомительный набор: 6 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки (бежевый цвет); 6 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки (белый цвет); 1 дискодержатель
5080	Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral для шлифовки: 12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки (бежевый цвет)
5081	Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral для полировки: 12 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки (белый цвет)
5082SK	Спиральные диски Sof-Lex™ Spiral, сверхтонкие диски и штрипсы Sof-Lex™ - системный набор: 10 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для шлифовки, 10 спиральных дисков Sof-Lex™ Spiral для полировки, 120 сверхтонких дисков Sof-Lex™ XT 12,7 мм: по 30 шт. каждой степени абразивности, 120 сверхтонких дисков Sof-Lex™ XT 9,5 мм: по 30 шт. каждой степени абразивности, 15 штрипсы Sof-Lex™ (Грубые/Средние), 1 дискодержатель

“Фирма “Укр-Медмаркет”
г. Киев проспект Победы 9/47 ТМЦ “Медтехника” тел. (044) 590-15-00
Адреса остальных магазинов на сайте <http://kmm.com.ua>

3M

ООО «3М Украина». 3M ESPE
Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7-й этаж
Тел.: (044) 490-5777; факс: (044) 490-5775



3M, ESPE, Elipar, Filtek, L-Pop, Scotchbond, Sof-Lex,
Ubistesin являются торговыми марками компании
3M и 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2015. Все права защищены