

Профілактична паста зі фтором Clinpro™

Загальна інформація

Профілактична паста Clinpro™ зі фтором – це паста для чищення та полірування, що містить перліт, унікальний абразив. Грубі частинки абразивного матеріалу перліту під час використання перетворюються на тонкодисперсний порошок. Таким чином, паста для чищення стає пастою для полірування. Профілактична паста Clinpro™ містить фторид натрію у концентрації 1,23 % фторид-іону. Профілактична паста Clinpro™ постачається в окремих дозувальних чашках. Кожна чашка містить 2 грами пасту – достатня кількість для однієї профілактичної процедури. Кожна коробка з профілактичною пастою Clinpro™ містить кільце-утримувач чашок.

Показання

- Для процедур чищення та полірування у складі комплексу профілактичних заходів у клініці.

Застережні заходи для пацієнтів

Проковтування надмірних кількостей фториду може спричинити нудоту.

Профілактичну пасту Clinpro™ слід видаляти з ротової порожнини пацієнта.

Пасту НЕ МОЖНА КОВТАТИ. У разі проковтування великих кількостей пасту зверніться до паспорту безпеки матеріалу. Щоб отримати його, ви можете зв'язатись із місцевим представництвом компанії.

Інструкції з експлуатації

ПРИМІТКА. Профілактичну пасту Clinpro™ призначено для виростання спеціалістами, що пройшли спеціальне тренування з проведення профілактичних стоматологічних заходів.

Щоб якнайкраще скористатися унікальним складом пасту Clinpro™, може знадобитися вживання іншої техніки нанесення. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з експлуатації.

1. Установіть дозувальну чашку в кільце з комплекту.
2. Нанесіть профілактичну пасту на зуби за допомогою будь-якого стандартного гігієнічного кутового наконечника та чашки. Щоб заповнити чашку, занурте її в пасту. Наконечник має обертатись із малою швидкістю.
3. Нанесіть профілактичну пасту невеликими порціями на 2–3 зуби. Через деякий час після початку обробки очищувальні властивості та абразивність пасту зменшаться, а полірувальні якості – збільшаться.
4. Щодо обробки зубного ряду с оголеними поверхнями коренів або дентину.
 - a. Обробку почніть із емалі, поки паста свіжа та більш абразивна.
 - b. Потім, коли абразивні властивості пасту зменшаться, переходьте до обробки оголених коренів та дентину.
5. Потім наберіть нову порцію пасту та відповідним чином обробляйте наступні 2–3 зуби. Повторюйте ці дії, поки всі зуби не будуть оброблені.
6. Якщо на зубах залишилися які-небудь плями – обробіть їх свіжою порцією пасту.
7. Протягом процедури стежте, щоби кількість пасту у чашці залишалась достатньою, аби уникнути перегріву поверхонь зубів.
8. Поліруючи, час від часу змивайте пасту з поверхонь зубів. Щоб уникнути надмірного розбавлення пасту та її проковтування, рекомендується відсмоктувати слину.
9. Використану чашку для профілактичної пасту слід викинути відповідно до державних, федеральних та регіональних правил.

Зберігання та використання

Цей продукт розраховано на використання за кімнатної температури. Якщо матеріал зберігався за більш холодної температури, перед використанням дочекайтеся, поки він не прогріється до кімнатної температури. Термін зберігання за кімнатної температури складає 24 місяців. Температура оточуючого повітря, що перевищує 27°C/80°F, може скоротити термін зберігання. Кінцеву дату використання див. на зовнішній упаковці.

Кільце слід дезінфікувати за протоколом дезінфекції низького або середнього рівня (контактна рідина) відповідно до

Інструкція із застосування

рекомендацій Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) та затверджених Американською стоматологічною асоціацією (ADA). Вказівки Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings, 2003 (вип. 52, № RR-17), видання Центру контролю та профілактики захворювань США. Кільце також можна обробляти автоклавом.

Утилізація

Інформація щодо утилізації знаходиться в паспорті безпеки матеріалів

Інформація для покупця

Заборається надавати інформацію, що відрізняється від даних, які містяться в поданій інструкції.

Увага! Згідно з федеральним законодавством США, цей продукт може продаватися й використовуватися виключно за призначенням спеціаліста-стоматолога.

Гарантія

Компанія 3M ESPE гарантує відсутність у цьому препараті дефектів матеріалу чи виробництва. КОМПАНІЯ 3M ESPE НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА, БУДЬ-ЯКИХ ДОМИСЛЮВАНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО ТОВАРНОГО СТАНУ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ АБО ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ ПОКУПЦЯ.

Користувач несе повну відповідальність за придатність цього продукту для власних певних цілей.

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного періоду його усунення й відповідальність компанії 3M ESPE обмежуються ремонтом і заміною цього виробу 3M ESPE.

Обмеження відповідальності

За винятком ситуацій, прямо передбачених законодавством, компанія 3M ESPE не несе відповідальності за будь-які збитки та шкоду, спричинені використанням цього виробу: прями, посередні, навмисні, випадкові або опосередковані збитки, незалежно від висунутих пояснень, зокрема гарантій, контрактів, необережного ставлення чи об'єктивної відповідальності.



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "3М Україна" Вул. Амосова, 12, 7-й поверх
м. Київ, 03680, Україна

Тел. +38(044)4905777

Електронна адреса: Support.ua@mmm.com