

Профілактичний порошок для ніжного видалення над'ясенних та під'ясенних відкладень Clinpro™ Glycine Prophy Powder

Опис продукту

Порошок Clinpro™ Glycine Prophy Powder - це профілактичний порошок для ніжного та професійного видалення над'ясенних та під'ясенних зубних відкладень і нальоту під час чищення зубів з використанням повітряно-абразивних систем. У випадку під'ясенного застосування матеріал може використовуватися в якості допоміжного препарату при лікуванні парадонтиту та періімплантиту.



*Цей символ на флаконі значить наступне:
збовтати перед використанням.*

Дану інструкцію із застосування зберігати протягом всього строку експлуатації матеріалу.

Показання для застосування

- Професійне чищення зубів: видалення над'ясенних та під'ясенних зубних відкладень і нальоту.
- Порошок також можна використовувати при наявності незнімних ортодонтичних систем (брекетів), реставраційних матеріалів, матеріалів для протезування та імплантатів.
- Для догляду під час лікування періодонтиту після завершення першочергової обробки (у випадку застосування стандартних засобів) для ясенних кишень глибиною до 5 мм.
- Для догляду під час лікування періімплантиту після завершення першочергової обробки (у випадку застосування стандартних засобів) для ясенних кишень глибиною до 5 мм.

Запобіжні заходи

- Зубний камінь не знімається за допомогою Clinpro Glycine Prophy Powder.
 - Для пацієнтів з хронічним бронхітом чи астмою використовувати порошок Clinpro Glycine Prophy Powder слід особливо обережно, оскільки дрібна аерозольна суміш повітря та порошку може викликати ускладнення дихання.
 - При використанні повітряно-абразивних систем і лікар, що виконує процедуру, і пацієнт повинні вдягти захисні окуляри на час експлуатації апарата. Випадкове попадання порошку в очі може викликати серйозні пошкодження. Дрібний порошок пил може стати причиною подразнення при попаданні на контактні лінзи. Пацієнти, які носять окуляри, повинні застосовувати поверх них захисні окуляри з метою запобігання їх забрудненню під час процедури.
 - Вдягніть маску для захисту від потрапляння часток пилу (напр., під час заповнення системи).
 - Під час процедури не направляйте розпилювач безпосередньо на ясна. Належне розміщення розпилювача описане в розділі «Обробка зубів пацієнта». Як і у випадку зі всіма профілактичними порошками, при використанні стисненого повітря в порожниці рота існує ризик провокування виникнення підшкірної емфіземи.
 - Звертайте увагу на можливі обмеження при лікуванні пацієнтів з високим рівнем ризику (загальна слабкість імунітету, ендокардит), оскільки бактеріємія може виникнути під час обробки глибокої парадонтальної кишені.
 - Під час обробки завжди використовуйте слиновідсмоктувач.
 - Ніколи не застосовуйте повітряно-абразивну систему без води, оскільки це ускладнює відсмоктування повітряно-порошкової суміші, що спричиняє пошкодження ділянки, що піддається лікуванню.
- Паспорти безпеки компанії 3M ви можете отримати у нашому місцевому представництві.

Показання для застосування

Порошок Clinpro Glycine Prophy Powder призначений для використання в наявних повітряно-абразивних системах. Оля роботи з якимось конкретним пристроєм дійте у відповідності до інструкції з експлуатації до цього пристрою.

Заповнення порошком

- Повністю видаліть будь-які залишки інших очисних порошоків за допомогою продування; для чищення

під'ясенних ділянок ніколи не використовуйте порошки на бікарбонатній чи карбонатній основі!

- Не використовуйте воду чи пару для очищення, оскільки зволожений порошок може спричинити закупорку форсунки.
- Збовтайте флакон перед засипанням порошку у відповідний резервуар пристрою.
- Відкрийте вверх носик пляшки.
- Досипайте профілактичний порошок у резервуар пристрою до тих пір, поки він не досягне максимального рівня (дивіться маркування на пристрої). З метою запобігання пилоутворення засипайте порошок повільно.

Налаштування повітряно-абразивної системи

Очисна ефективність профілактичного порошку залежить від цілого ряду факторів, серед яких повітряно-абразивна система, що використовується, та налаштування тиску повітря та потоку води.

Дотримуйтеся інструкції з використання системи та перевірте налаштування для точного визначення оптимальних умов для застосування ще до початку процедури. У випадку виникнення питань стосовно налаштувань звертайтеся до виробника повітряно-абразивної системи чи стоматологічного крісла.

Спрямуйте струмінь аерозолі, напр., на раковину умивальника та розпилюйте протягом приблизно 10 секунд, поки суміш води та порошку не стане однорідною.

Підготовка пацієнта

Змастіть вазеліном кутики рота пацієнта з метою запобігання їх висушування та тріскання шкіри.

Розмістіть слиновідсмоктувач в кутик рота пацієнта так, щоб область відсмоктування під язиком була сухою.

Для відсмоктування суміші води/повітря, що відбивається від зубів, використовуйте аспіраційну канюлю.

Обробка зубів пацієнта

Над'ясенне лікування чи непокріті шийки зуба: утримуйте форсунку поблизу поверхні зуба на відстані максимум 4 мм та під кутом 30°-90°; розпилюйте суміш на обидва боки зуба протягом 5 секунд, постійно переміщуючи форсунку круговими рухами.

Під'ясенне лікування: утримуйте форсунку поблизу краю ясен на відстані максимум 4 мм та під кутом 30°-60°. Оозпилюйте суміш безпосередньо на зуб вздовж краю ясен, виконуючи плавні рівномірні рухи, для під'ясенного очищення. Вим менший кут, тим глибше буде проникати струмінь з порошком з зубо-ясенну борозну і тим менше розбризкуватиметься водно-порошкова суміш.

Струмінь спрямовуйте не в одну і ту саму точку, а рівномірно на всю поверхню, щоб забезпечити однаковий ефект чищення.

Під час обробки аспіраційну канюлю тримайте поруч з зубом, що піддається обробці.

Підготовка пристрою до наступної процедури

Спорожніть резервуар для порошку в кінці робочого дня та повністю видаліть залишки порошку за допомогою продування сухим повітрям. Після цього закрийте резервуар для порошку та запустіть прилад на приблизно 5 секунд для видалення залишків порошку з системи та її ліній.

Якщо ви використовуєте різні порошки, то перед кожною заміною порошку спорожніть резервуар та шляхом продування сухим повітрям видаліть з нього всі залишки порошку. Уникайте контакту профілактичного порошку з вологою, оскільки вологий порошок може спричинити забивання форсунок.

Очистіть пристрій у відповідності до інструкцій з експлуатації.

Зберігання

Завжди зберігайте Clinpro Glycine Prophy Powder в закритому, сухому і чистому контейнері. Продукт зберігати при температурі 15-25 °C/59-77 °F. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Інформація для споживачів

Забороняється надавати будь-яку інформацію, що відрізняється від інформації даної інструкції.

Гарантія

Компанія 3M Deutschland GmbH гарантує відсутність в даному виробі дефектів, пов'язаних з вихідними матеріалами та виробничим процесом. КОМПАНІЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ, ВЛАСТИВОСТЕЙ АБО КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ. Користувач

Інструкція із застосування

несе відповідальність за визначення придатності даного виробу для використання відповідно до його (користувача) цілей. У разі виявлення дефекту виробу в гарантійний період відповідальність фірми 3M Deutschland GmbH обмежується ремонтом або заміною даної продукції.

Обмеження відповідальності

За винятком ситуацій, прямо передбачених законодавством, компанія 3M Deutschland GmbH не несе жодної відповідальності за будь-які збитки і шкоду, що випливають з використання даної продукції, будь-які чи то прями, непрямі, умисні, випадкові або опосередковані збитки чи шкода і незалежно від висунутих пояснень, у тому числі гарантій, контрактів, недбалості або об'єктивної відповідальності.



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ЗМ Україна" Вул. Амосова, 12, 7-й поверх м.
Київ, 03680, Україна
Тел. +38(044)4905777
Електронна пошта: Support.ua@mmm.com